




VICAIR®

4

HET MEEST GEBRUIKSVRIENDELIJKE ROLSTOELKUSSEN VOOR HOOGWAARDIGE HUIDBESCHERMING

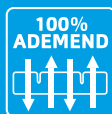

 100% NEDERLANDS
 PRODUCT

relief by air

EXTREEM GEBRUIKSVRIENDELIJK EN HOOGWAARDIGE HUIDBESCHERMING

- ▶ Hoogwaardige huidbescherming en gelijkmatige herverdeling van druk
- ▶ Extreem makkelijk in gebruik
- ▶ Ondersteunt bekken en bovenbenen voor een stabiele zithouding



Veilig in gebruik en ligt altijd goed:
boven = onder; links = rechts;
voor = achter.



4 gelijke compartimenten

De Vicair 4 is een zitkussen voor rolstoelgebruikers. Het bestaat uit vier identieke aparte compartimenten die comfort, hoogwaardige huidbescherming en ondersteuning van de zithouding bieden. De Vicair 4 is zo ontworpen dat de gebruiker in het kussen zinkt en omhuld wordt door de SmartCell-vulling. Dit zorgt voor een stabiele zithouding en helpt de huid te beschermen door druk gelijkmatig te verdelen en schuifkrachten te minimaliseren. De Vicair 4 past zich automatisch aan de lichaamscontouren aan, zelfs bij een geringe bekkenscheefstand.


De Vicair 4 is extreem makkelijk en veilig in gebruik: het kussen ligt altijd goed. Zowel de vier zijdes als de boven- en onderkant zijn identiek. Het kussen is volledig machinewasbaar tot max. 60°C. Er is geen pomp of andere apparatuur nodig om de Vicair 4 in te stellen of te gebruiken. Het is een kussen voor veilig langdurig gebruik, dagelijks controleren is niet nodig: honderden SmartCells creëren meerdere lagen tussen gebruiker en zitting.

| diepte | breedte | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|----|
| | Inch | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | CM | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 16 | 40 | ■ | | | | |
| 17 | 43 | | ■ | | | |
| 18 | 45 | | | ■ | | |
| 19 | 48 | | | | ■ | |
| 20 | 50 | | | | | ■ |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte 8 cm / 3 1/4"
 Gemiddeld gewicht 0,8 kg / 1.8 lbs
 Max. gebruikersgewicht 250 kg / 551 lbs
 Verkrijgbare maten Zie de maattabel

- Verkrijgbaar
- Niet verkrijgbaar

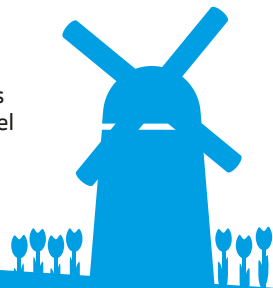



MICROKLIMAATBEHEERSING

Microklimaat van de huid is een additionele indirecte risicofactor voor het ontwikkelen van decubitus. Microklimaat wordt beïnvloed door de temperatuur en vochtigheid aan het huidoppervlak. Daarom wordt aanbevolen de huid droog en koel te houden.

Het Vicair 4 kussen is volledig gemaakt van een geperforeerde stof. Hierdoor kan overtollig vocht van de huid wegvloeien. Ook lucht kan door de open structuur makkelijk in, uit en door het kussen stromen, waardoor warmte-opbouw wordt verminderd. Al met al houdt het de huid onder alle omstandigheden zo droog en koel mogelijk.

MACHINEWASBAAR

Altijd op een schoon en hygiënisch kussen zitten was nog nooit zo eenvoudig! Wanneer iemand lang intensief gebruik maakt van een zitkussen, kan en zal het vies worden. Het is dus belangrijk dat het goed en makkelijk kan worden gereinigd. De Vicair 4 is volledig machinewasbaar tot max. 60°C. Er zijn geen speciale machines, procedures of ontsmettingsmiddelen nodig, alleen een wasmachine en wat wasmiddel. Laat het kussen na het wassen een paar uur aan de lucht drogen en dan is het weer klaar voor gebruik.



GEKLEURD LABEL, WEL ZO MAKKELIJK

Aan zowel het kussen als de hoes is hetzelfde kleurlabel bevestigd. Zo is makkelijk te zien of het kussen en de hoes dezelfde maat hebben, zonder dat je de informatie op de productlabels hoeft te controleren. Dit is vooral erg handig in een omgeving waar meerdere Vicair 4 kussens in gebruik zijn. De kleurcodering is uniek voor dit model Vicair kussen.

Huidbescherming, ondersteuning van de zithouding en gebruiksvriendelijk. Daarom is Vicair 'The Perfect Package'!
- Vicair-gebruikers wereldwijd

VICAIR'S GRENSVERLEGGENDE TECHNOLOGIE

Het beste medium voor het herverdelen van druk is lucht. Vicair heeft de lucht weten te vangen in SmartCells, waarvan er honderden in een rolstoelkussen zitten. De cellen bewegen zich onafhankelijk van elkaar, waardoor het antidecubituskussen zich langzaam aan de vorm van het lichaam aanpast. Het resultaat is een superieure drukverdeling, optimale positionering en uitmuntend zitcomfort voor de gebruiker. De Vicair technologie is ontwikkeld in samenwerking met het revalidatiecentrum Amsterdam (Reade) en bekroond met de Grand Prix op de Salon des Inventions in Genève.




READY FOR USE

Het Vicair kussen is vanuit de doos direct klaar voor gebruik



100% MACHINE WASBAAR

Kussen inclusief SmartCells op 60°C machine-wasbaar

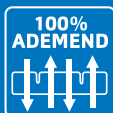

100% ADEMEND

Door de open structuur van het kussen vindt er optimale temperatuur- en vochtregulatie plaats



VORMVAST KUSSEN

Dit kussenmodel behoudt haar vorm, waardoor de gebruiker beter beschermd is



Op de laatste generatie Vicair SmartCells zit levenslange garantie



VICAIR®

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
Nederland
T + 31 (0)75 642 99 99
info@vicair.com
vicair.com

Volg ons op



CONTACT GEGEVENS DISTRIBUTEUR



T: +32(0)3 620 20 20 F: +32(0)3 666 48 94
info@vermeiren.be
www.vermeiren.be